

Ficha Técnica Inhalocámara

La **inhalocámara AEROMEDIC** fue diseñada para garantizar el mejor aprovechamiento de los medicamentos inhalados y con características que permiten una fácil utilización para todos los pacientes.

Disponible en las siguientes presentaciones:

- Inhalocámara con máscara para adultos
- Inhalocámara con máscara pediátrica
- Inhalocámara para bebés
- Inhalocámara sin máscara
- Inhalocámara traqueostomía



Dispositivo médico que minimiza el impacto del aerosol inhalado en la orofaringe, facilitando la reducción del volumen de las partículas de aerosol, hasta alcanzar el tamaño óptimo para ingresar al árbol bronquial donde deben actuar.

Materiales

Las máscaras y el adaptador universal son elaboradas en un material suave que se adapta a la anatomía de la cara con un efecto hermético, sin lastimar la piel, minimizando los riesgos de alergias, es de color translucido de fondo blanco.

El cuerpo de la inhalocámara está elaborado en un material resistente, translucido, que permite visualizar el interior de la cámara para verificar la salida del aerosol del inhalador y/o presencia de un cuerpo extraño dentro de la cámara.

Componentes ● Cámara con válvula ● boquilla, Adaptador universal ● Máscaras



Volumen

Para las presentaciones de adulto (9 años en adelante) y pediátrica (3 a 8 años) las inhalocámaras tienen un volumen de 510 c.c. y para las inhalocámaras de bebé (0 meses a 2 años) un volumen de 235 c.c. Estos volúmenes permiten una adecuada distribución del aerosol para ser inhalado eficientemente.

Empaque

La presentación y el empaque de la inhalocámara es de forma individual en su respectiva caja, donde están consignadas las instrucciones para su uso.

Limpieza

Se deben separar las dos piezas y limpiar con un paño humedecido en agua jabonosa, se deja secar y empata haciendo presión hasta que quede hermética, nuevamente para su uso.

