

# CÓMO USAR SU INHALOCÁMARA

  
MediPlast



1. Quite la tapa y agite el inhalador con fuerza.

2. Si no ha utilizado el inhalador durante al menos una semana o si es la primera vez que lo utiliza, dispare primero en el aire para probar su correcto funcionamiento.

3. Inspire y a continuación, suelte el aire despacio. Inmediatamente colóquese la inhalocámara en la boca situando los dientes alrededor de la boquilla (no coloque los dientes delante, ni muerda la boquilla), y ponga sus labios alrededor de la misma, "sellándola".

4. Empiece a respirar despacio a través de la inhalocámara.

5. Dispare el inhalador.

6. Continúe inspirando.

7. Contenga la respiración unos 10 segundos (apnea).

8. Espirar lentamente (Botar el aire).

9. Si necesita otra dosis, espere unos treinta segundos, agite el inhalador de nuevo y, a continuación repita los pasos.

10. Vuelva a tapar el inhalador.

11. Enjuague la boca.



Calle 41 # 34 - 53 Int. 105  
**Teléfono:** (57) (7) 634 78 47  
315 722 94 75  
mediplast.ventas@gmail.com  
www.mediplast.co  
**Bucaramanga, Colombia**